

赤外線測定器付き 自動消毒液ディスペンサー



検温

おでこを温度センサーに近づけると
自動で検温

* 手の表面温度は気温や体調の影響を
受けやすく、また個人差も大きいので、
おでこで検温される事をお勧めします。

自動噴霧

手をかざすと非接触で消毒液が
噴霧

簡単設置

台置き、壁掛け OK

感染症対策の基本は手の消毒！

手動ポンプ式の消毒液ディスペンサーは交差汚染のリスクがあります。
本製品は **検温** と **消毒** が **非接触かつ簡単・安全** に行えるので、病院や教育機関、飲食店、オフィスなどに設置される事をお勧めします。

病院



学校や幼稚園



飲食店



オフィス



【自動センサー感知】

自動センサーを搭載しているので、手をかざした瞬間にボトルの中の消毒液が適量、自動で噴霧されます。汚れた手でポンプに触らずに手指の消毒ができるので、交差汚染のリスクがなく、最適な手指衛生が実現できます。

【簡易検温機能】

温度センサーを搭載しているので、体表面の検温が行えます。高温を検知した場合は「ピーピー」というアラームが鳴ります。なお手の表面温度は気温の影響を受けやすく、また個人差も大きいので、おでこで検温される事をお勧めします。

【2種類の電源供給に対応】

ACアダプタか単3電池4本のどちらかで動作します。ACアダプタをご利用できない環境でも単3電池でご利用可能です。

★ACアダプタと単3電池は製品に付属しておりません。
お客様でご用意ください。

【1.3リットルの大容量ボトル】

1.3リットルの大容量ボトルなので、消毒液の小まめな補充は必要ありません。



本体上部の温度センサーで体表面の温度を測定できます。

測定結果によりディスプレイの色が変わり（緑、黄、赤）、ブザーが鳴ります。



～37.2℃
37.3～37.9℃
38.0℃～

計測値表示 + 表示画面 緑 + 電子音(ピッ!)
計測値表示 + 表示画面 橙 + 電子音(ピッ!)
計測値表示 + 表示画面 赤 + 電子音(ピッ! ピッ! ピッ!)

ボトル容量	1,300ml
液体タイプ	液体タイプのアルコール消毒液・次亜塩素酸水・中性もしくは弱酸性の消毒液
設置方法	卓上、壁掛け
温度センサーの精度	±0.3℃
機能	消毒液の残量がない場合警告点灯あり
外形サイズ	131(幅)x400(高さ)x131(奥行)mm
重量	1.1kg
電源	ACアダプタ もしくは 単3電池4本 ★ACアダプタ、単3電池ともに製品に付属しておりません。お客様でご用意ください。 ACアダプタの規格：DC5V 1A (Φ5.5 x Φ2.1 センタープラス) 単3電池4本使用時：約8,000回の使用が可能
保証期間	購入後1年 (保証時の対応は新品との交換になります)



Quality, Quantity, Quickly
サンキューテクノス株式会社

〒143-0015
東京都大田区大森西1-9-12
TEL 03-3762-5161 FAX 03-3762-5188
<https://www.qqqtec.co.jp/>

販売店